

CONTAK RENEWAL[®] 3 et 4 Serrage des huit (8) vis de fixation

RÉSUMÉ

À l'instar des défibrillateurs de resynchronisation cardiaque (CRT-D) CONTAK RENEWAL[®] 1 et 2, les modèles CONTAK RENEWAL 3 et 4 comportent chacun huit (8) vis de fixation qui doivent être resserrées lors de la connexion des sondes au stimulateur. Toutefois, les emplacements des vis de fixation ont changé sur les modèles CONTAK RENEWAL 3 et 4.

Les modèles CONTAK RENEWAL 3 et 4 comportent chacun huit (8) vis de fixation qui doivent être resserrées lors de la connexion des sondes au stimulateur. Comme le montre le diagramme ci-dessous, quatre (4) vis de fixation sont situées sur la partie supérieure du connecteur (Figure 1), trois (3) vis de fixation se trouvent à l'arrière du connecteur (Figure 2) et une vis de fixation (1) à l'avant (Figure 3).

Rappel : n'oubliez pas de resserrer les huit vis de fixation des défibrillateurs de resynchronisation cardiaque CONTAK RENEWAL 3 et 4.

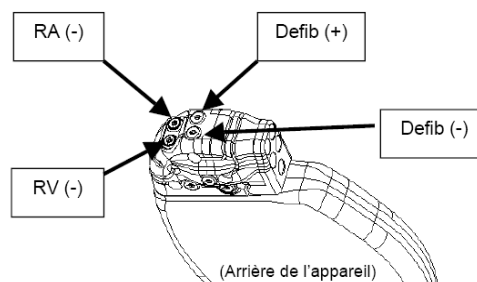


Figure 1. Partie supérieure du connecteur

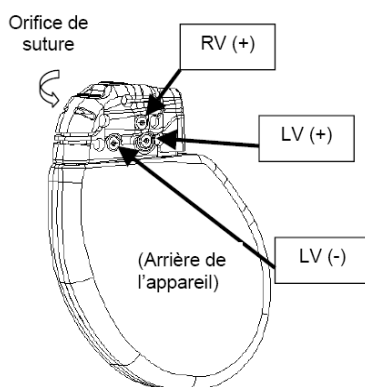


Figure 2. Face arrière du connecteur

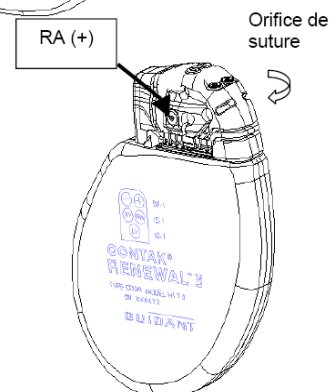


Figure 3. Face avant du connecteur

PRODUITS CRM RÉFÉRENCÉS

Les marques suivantes sont des marques déposées de Cardiac Pacemakers, Inc., une société de Boston Scientific : CONTAK RENEWAL

Les produits référencés ici peuvent ne pas être autorisés dans toutes les zones géographiques. Pour des informations complètes sur le fonctionnement de l'appareil, consulter l'étiquetage du produit concerné.

CRM CONTACTS

États-Unis

www.bostonscientific.com

Services Techniques – États-Unis
Support Médecin LATITUDE – États-Unis

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

tech.services@bsci.com

latitude@bsci.com

Services Patients

1.866.484.3268

International

www.bostonscientific-international.com

Services Techniques – Europe

+32 2 416 7222

eurtechservice@bsci.com

Serveur sécurisé du système LATITUDE

www.latitude.bostonscientific-international.com

latitude.international@bsci.com